

CDV + CPV Ag Combined Test

Instructivo de uso

REF VIDP-525 | Español

USO INDICADO

Combo de Prueba de CDV+CPV (secreciones + heces/vomito) es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para la detección del Virus de Distemper Canino (Ag CDV) en secreciones nasales/oculares y el Parvovirus canino (Ag CPV) en las heces o el vómito de perros.

PRINCIPIO

Combo de Prueba de CDV+CPV es un ensayo cualitativo inmunocromatográfico de flujo lateral para la detección de antígenos del Distemper canino (CDV) y del Parvovirus canino (CPV). El casete de prueba tiene dos ventanas de pruebas, cada una tiene una zona de prueba (T) y una de control (C). Durante la prueba, la muestra se aplica en los pozos de las muestras del casete. Si se presentan antígenos CDV o CPV, en la muestra, aparecerá una línea de color en la zona de prueba indicando un resultado positivo. Si la muestra no contiene antígenos CDV o CPV, no aparecerá una línea de color que indique un resultado negativo. Para que sirva como control de procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la zona de control que indica que se ha agregado el volumen adecuado de muestra y que se ha producido la absorción de la membrana.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar tal como está empaquetado en la bolsa sellada a temperatura ambiente o refrigerado (2-30° C). La prueba está segura hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. El casete de prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELAR. No lo use después de la fecha de vencimiento.

PRECAUCIONES

- No usar después de la fecha de expiración.
- Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos durante la prueba y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.
- Use guantes desechables y protección para los ojos cuando se analicen las muestras.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.

- No retire el casete de prueba de su bolsa hasta inmediatamente antes de usarlo.
- No reutilice el kit de prueba
- No mezcle componentes de diferentes lotes y productos.

MATERIALES

Materiales suministrados

- Casetes de prueba
- Tubos de plástico con solución buffer
- Instructivo de uso
- Cuentagotas
- Hisopos


Materiales no suministrados

- Cronómetro

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Deje que el casete de prueba, la muestra, el buffer y / o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15-30° C) antes de realizar la prueba.

1. Retire el casete de prueba de la bolsa y utilícelo lo antes posible. Se obtendrán mejores resultados si la prueba se realiza en el plazo de 1 hora
2. Recolección de la muestra:
 - a. Para heces/vomito:
Recolecte con el hisopo las heces del ano del perro o el vómito del suelo. La cantidad de frotis fecal de la siguiente manera:

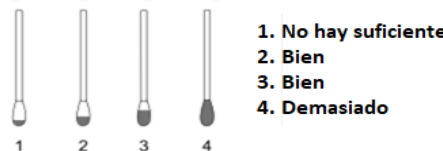

Inserte el hisopo húmedo en los tubos con buffer. Agítelo para asegurar una buena extracción de la muestra.

b. Para secreciones:

Recolecte muestra de secreciones oculares y nasales del perro con el hisopo suministrado. Humedezca el hisopo lo suficiente. Nota: Recoja la secreción ocular de los párpados superior e inferior, y evite las secreciones de la esquina del ojo.

Inserte el hisopo húmedo en los tubos con buffer. Agítelo para asegurar una buena extracción de la muestra.


3. Coloque el casete de prueba sobre una superficie limpia y nivelada. Sostenga el cuentagotas verticalmente y añada 3-4 gotas de muestra extraída (aproximadamente 120-160 µl) en el pozo de la prueba (S), y ponga en marcha el cronómetro. Véase la imagen posterior.
4. **Lea el resultado en 5-10 minutos.** No interprete los resultados después de 15 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: la presencia de la línea C y la línea T, independientemente de que la línea T sea fuerte o débil.

Negativo: solo aparece una línea C clara.

No válido: no aparece ninguna línea de color en la zona C, independientemente de la apariencia de la línea T.

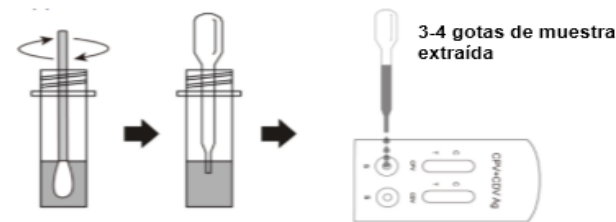

LIMITACIONES

Combo de Prueba de CDV+CPV es para uso diagnóstico in vitro solo para caninos. Todos los resultados deben considerarse junto con otra información clínica disponible del veterinario. Para confirmar los resultados, se recomiendan métodos de confirmación como la PCR.

Índice de símbolos

	Atención, lea el instructivo de uso		Pruebas por kit		No reutilizar
	Solo para uso de diagnóstico in vitro		Utilizado por		# de catálogo
	Almacenar entre 2-30°C		Número de lote		Consulte las instrucciones de uso
	No utilizar si el empaque está dañado		Fabricante		



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.

#550, Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou - 310018, P. R. China
www.alltests.com.cn

Registro SENASA N°:

Importado y Distribuido por Mont Group SAC

USO VETERINARIO

Venta libre

Mantener fuera del alcance de los niños

Número: 146025500

Fecha de vigencia: 03/04/2019