

Feline Immunodeficiency Virus Ab Test

Instructivo de uso

REF VIIV-402 Español

USO INDICADO

Prueba Ab del virus de inmunodeficiencia felina (sangre total/suero/plasma) es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa del anticuerpo del Virus de inmunodeficiencia felina (Ab VIF) en muestras de sangre total, suero o plasma del felino.

PRINCIPIO

Prueba Ab del virus de inmunodeficiencia felina es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral basado en formato sándwich. El casete tiene una ventana de prueba, la cual tiene una zona invisible de prueba (T) y una de control (C). Cuando se aplique la muestra en el pozo de la prueba del casete, el líquido fluirá lateralmente en la superficie de la tira reactiva. Si en la muestra hay suficientes anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia felina, aparecerá una línea visible en la zona T. La línea en la zona C siempre debería aparecer después de aplicar la muestra, indicando un resultado válido. De este modo, el casete puede indicar con precisión la presencia de anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia felina en la muestra.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar tal como está empaquetado en la bolsa sellada a temperatura ambiente o refrigerado (2-30° C). La prueba está segura hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. El casete de prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELAR. No lo use después de la fecha de vencimiento.

PRECAUCIONES

- No usar después de la fecha de expiración.
- Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos durante la prueba y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.
- Use guantes desechables y protección para los ojos cuando se analicen las muestras.

- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
- No retire el casete de prueba de su bolsa hasta inmediatamente antes de usarlo.
- No reutilice el kit de prueba
- No mezcle componentes de diferentes lotes y productos.

MATERIALES

Materiales suministrados

- Casetes de prueba
- Buffer
- Instructivo de uso
- Cuentagotas


Materiales no suministrados

- Cronómetro
- Recipiente de muestra
- Centrifugadora (para el plasma)

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Deje que el casete de prueba, la muestra, el buffer y / o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15-30° C) antes de realizar la prueba.

1. Tome muestras de sangre total fresca, o separar el suero o el plasma de la sangre del felino lo antes posible para evitar la hemólisis. Utilice solo muestras claras y no hemolizadas. No deje las muestras a temperatura ambiente por periodos prolongados. Las muestras de suero y plasma deben almacenarse de 2 a 8°C durante un máximo de 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras de suero y plasman deben conservarse a menos de -20°C.
2. Coloque el casete de prueba sobre una superficie limpia y nivelada. Sostenga el cuentagotas verticalmente y añada 1 gota de muestra (aproximadamente 25 µl) e inmediatamente añada 4 gotas de buffer (aproximadamente 160 µl) en el pozo de la prueba (S), y ponga en marcha el cronómetro. Véase la imagen posterior.
3. **Lea el resultado en 5-10 minutos.** No interprete los resultados después de 15 minutos.

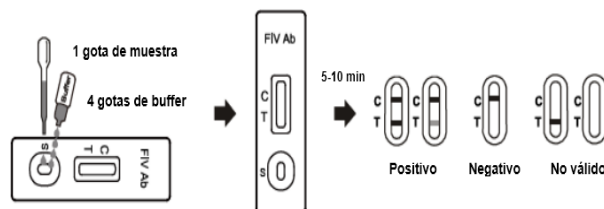

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: la presencia de la línea C y la línea T, independientemente de que la línea T sea fuerte o débil.

Negativo: solo aparece una línea C clara.

No válido: no aparece ninguna línea de color en la zona C, independientemente de la apariencia de la línea T.

LIMITACIONES

Prueba Ab del virus de inmunodeficiencia felina es solo para uso diagnóstico veterinario in vitro. Todos los resultados deben considerarse junto con otra información clínica disponible del veterinario. Para confirmar los resultados, se recomiendan métodos de confirmación como la PCR.

Índice de símbolos

	Atención, lea el instructivo de uso		Pruebas por kit		No reutilizar
	Solo para uso de diagnóstico in vitro		Utilizado por		# de catálogo
	Almacenar entre 2-30°C		Número de lote		
	No utilizar si el empaque está dañado		Fabricante		



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.

#550, Yin Hai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou - 310018, P. R. China
www.alltests.com.cn

Registro SENASA N°:
Importado y Distribuido por Mont Group SAC
USO VETERINARIO
Venta libre
Mantener fuera del alcance de los niños

Número: 145857901
Fecha de vigencia: 09/10/2019