

Canine Parvovirus Ag Test

Instructivo de uso

REF VIPV-602 | Español

USO INDICADO

Prueba de Ag de parvovirus canino (Heces/vomito) es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa del antígeno del parvovirus canino (Ag CPV) en las heces o el vómito de canes.

PRINCIPIO

Prueba de Ag de parvovirus canino es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral basado en formato sándwich. El casete de prueba tiene una ventana de prueba. Durante la prueba, la muestra se aplica en el pozo de muestra del casete. Si se presentan antígenos CPV, en la muestra fecal, reaccionaran con las partículas de oro coloidal recubiertas de anticuerpos anti-CPV en la tira reactiva. Luego, la mezcla migra hacia arriba en la membrana cromatográficamente por acción capilar y reacciona con anticuerpos anti-CPV en la membrana en la zona de la línea de prueba. Si la muestra contiene Parvovirus canino, aparecerá una línea de color en la zona de la línea de prueba que indica un resultado positivo. Si la muestra no contiene antígenos de CPV, no aparecerá una línea de color que indique un resultado negativo. Para que sirva como control de procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la zona de control que indica que se ha agregado el volumen adecuado de muestra y que se ha producido la absorción de la membrana.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar tal como está empaquetado en la bolsa sellada a temperatura ambiente o refrigerado (2-30° C). La prueba está segura hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. El casete de prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELAR. No lo use después de la fecha de vencimiento.

PRECAUCIONES

- No usar después de la fecha de expiración.
- Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos durante

la prueba y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.

- Use guantes desechables y protección para los ojos cuando se analicen las muestras.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
- No retire el casete de prueba de su bolsa hasta inmediatamente antes de usarlo.
- No reutilice el kit de prueba
- No mezcle componentes de diferentes lotes y productos.

MATERIALES

Materiales suministrados

- Casetes de prueba (Composición: IgG anti-ratón de cabra 500-900ng, IgG de ratón 200-400ng, CPV Ab (Recubrimiento) 100-400ng, CPV Ab (Etiquetado) 30-100ng).
- Tubos de plástico con buffer
- Instructivo de uso
- Cuentagotas
- Hisopos


Materiales no suministrados

- Cronómetro

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Deje que el casete de prueba, la muestra, el buffer y / o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15-30° C) antes de realizar la prueba.


1. Recolecte con el hisopo las heces del ano del perro o el vómito del suelo. La cantidad de frotis fecal de la siguiente manera:

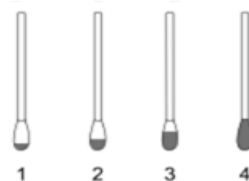

1. No hay suficiente
2. Bien
3. Bien
4. Demasiado

2. Inserte el hisopo húmedo en los tubos con buffer. Agítelo para asegurar una buena extracción de la muestra.
3. Coloque el casete de prueba sobre una superficie limpia y nivelada. Sostenga el cuentagotas verticalmente y añada 3 gotas de muestra extraída (aproximadamente 120 µl) en el pozo de la prueba (S), y ponga en marcha el cronómetro. Véase la imagen posterior.

4. **Lea el resultado en 5 minutos.** No interprete los resultados después de 10 minutos.

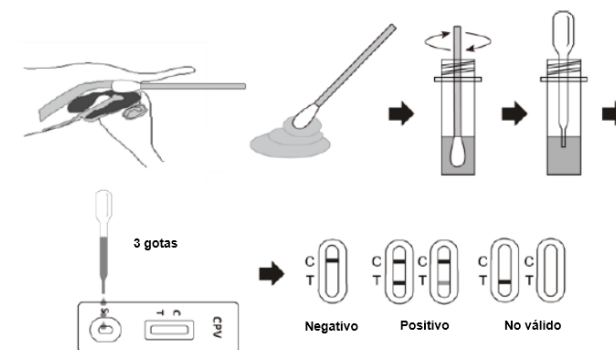

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: la presencia de la línea C y la línea T, independientemente de que la línea T sea fuerte o débil.

Negativo: solo aparece una línea C clara.

No válido: no aparece ninguna línea de color en la zona C, independientemente de la apariencia de la línea T.

LIMITACIONES

Prueba de Ag de parvovirus canino es para uso diagnóstico in vitro solo para caninos. Todos los resultados deben considerarse junto con otra información clínica disponible del veterinario. Para confirmar los resultados, se recomiendan métodos de confirmación como la PCR.

Índice de símbolos

	Atención, lea el instructivo de uso		Pruebas por kit		No reutilizar
	Solo para uso de diagnóstico in vitro		Utilizado por		# de catálogo
	Almacenar entre 2-30°C		Número de lote		Consulte las instrucciones de uso
	No utilizar si el empaque está dañado		Fabricante		



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.

#550, Yin Hai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou - 310018, P. R. China
www.alltests.com.cn

Registro SENASA N°:

Importado y Distribuido por Mont Group SAC

USO VETERINARIO

Venta libre

Mantener fuera del alcance de los niños

Número: 145848800

Fecha de vigencia: 22/06/2018