



FIV Ab + FELV Ag Combined Test Instructivo de uso

REF VIIIE-425	Español
---------------	---------

USO PREVISTO

Combo de Prueba de FIV Ab + FELV Ag es un casete combinado para diagnosticar diferencialmente la presencia de anticuerpos de inmunodeficiencia felina y antígeno del virus de la leucemia felina en la sangre total o suero y plasma felinos.

PRINCIPIO

Combo de Prueba de FIV Ab + FELV Ag se basa en un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral en sándwich. El casete de prueba tiene dos ventanas de prueba. Cada ventana de prueba tiene una zona T (prueba) invisible y una zona C (control). Cuando se aplica la muestra en los pocillos de muestra en el casete, el líquido fluirá lateralmente sobre la superficie de la tira reactiva. Si hay suficiente anticuerpo de inmunodeficiencia felina o antígeno del virus de la leucemia felina en la muestra, aparecerá una línea T visible en la ventana de prueba correspondiente. La línea C siempre debe aparecer después de aplicar una muestra, lo que indica un resultado válido. De este modo, el casete puede indicar con precisión la presencia de un anticuerpo de inmunodeficiencia felina o un antígeno del virus de la leucemia felina en la muestra.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacene tal como está empaquetado en el sobre sellado, conservar a temperatura de 15 a 30 °C. La prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en el sobre sellado. El casete de prueba debe permanecer en su sobre sellado hasta su uso. NO CONGELAR. No lo use después de la fecha de vencimiento.

PRECAUCIONES

- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos.
- Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos durante la prueba y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.
- Use guantes desechables y protección para los ojos cuando se analicen las muestras.
- La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente los resultados.
- No retire el casete de prueba de su sobre hasta que antes de usar.
- No reutilice el kit de prueba.
- No mezcle componentes de diferentes lotes y diferentes productos.

MATERIALES

Materiales proporcionados

- Casetes de prueba: Composición: FIV Ag1 (300-500ng), FIV Ag2 (200-500ng), FeLV Ab1 (300-500ng), FeLV Ab2 (200-500ng), IgG anti-ratón de cabra (300-700ng), IgG de ratón (600-800ng)
- Buffer


- Cuentagotas
- Instructivo de uso
- Temporizador
- Materiales necesarios pero no suministrados
- Contenedores de muestras

- Centrifuga (para plasma)

INSTRUCCIONES DE USO

Deje que el casete de prueba, la muestra, el buffer y / o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15-30 ° C) antes de realizar la prueba.

1. Recolecte la sangre entera fresca del felino o separe el suero o el plasma de la sangre lo antes posible para evitar la hemólisis. Utilice únicamente muestras transparentes no hemolizadas. No deje las muestras a temperatura ambiente durante períodos prolongados. Las muestras de suero y plasma se pueden almacenar a 2-8 ° C hasta por 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras de suero y plasma deben mantenerse por debajo de -20 ° C.
2. Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada.
3. Sostenga el cuentagotas en posición vertical y transfiera 1 gota de muestra (aproximadamente 25 µl) a los pocillos de muestras e inmediatamente agregue 4 gotas de buffer (aproximadamente 160 µl) en los pocillos de muestras, luego inicie el temporizador. Vea la ilustración a continuación.
4. Lea el resultado en 5-10 minutos. No interprete los resultados después de 15 minutos.

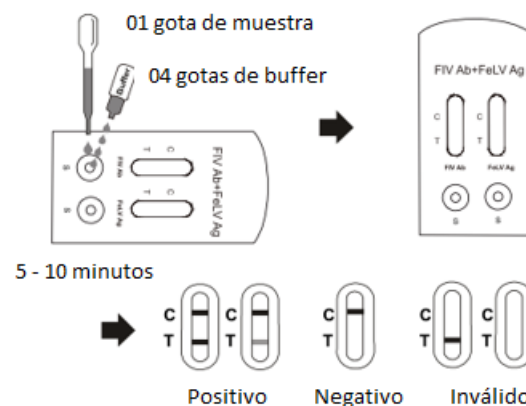

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: la presencia tanto de la línea C como de la línea T, sin importar que la línea T sea clara o vaga.

Negativo: solo aparece una línea C clara.

No válido: no aparece ninguna línea de color en la zona C, independientemente de si aparece la línea T.

LIMITACIONES

Combo de Prueba de FIV Ab + FELV Ag es para uso exclusivo para diagnóstico veterinario in vitro. Todos los resultados deben ser considerado con otra información clínica disponible en veterinario. Para obtener un resultado preciso, se sugiere aplicar otros métodos como PCR o ELISA para la determinación final en la práctica.

Índice de símbolos

	Atención, lea el instructivo de uso		Pruebas por kit		No reutilizar
	Solo para uso de diagnóstico in vitro		Utilizado por		# de catálogo
	Almacenar entre 2-30°C		Número de lote		Consulte las instrucciones de uso
	No utilizar si el empaque está dañado		Fabricante		



Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.

#550, Yin Hai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou - 310018, P. R. China
www.alltests.com.cn

Registro SENASA N°:

Importado y Distribuido por Mont Group SAC

USO VETERINARIO

Venta libre

Mantener fuera del alcance de los niños

Numero: 145857804

Fecha efectiva: 2019-10-09