



Canine Ehrlichia Ab

Instructivo de uso

REF VIEH-402

Español

USO PREVISTO

Prueba Ab de Ehrlichiosis canina es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral indirecto para la detección cualitativa del anticuerpo de Ehrlichia Canis (Ehrli Ab) en la sangre completa o suero y plasma caninos.

PRINCIPIO

Prueba Ab de Ehrlichiosis canina se basa en un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral. El casete de prueba tiene una ventana de prueba. La ventana de prueba tiene una zona T (prueba) invisible y una zona C (control). Cuando se aplica la muestra en el pozo de muestra en el casete, el líquido fluirá lateralmente sobre la superficie de la tira reactiva. Si hay suficientes anticuerpos de Ehrlichia Canis en la muestra, aparecerá una línea T visible. La línea C siempre debe aparecer después de aplicar una muestra, lo que indica un resultado válido. De esta manera, el casete puede indicar con precisión la presencia de anticuerpos de Ehrlichia Canis en la muestra.

COMPOSICIÓN CUALI-CUANTITATIVA

Reactivo: IgG anti-ratón de cabra (400-800ng), IgG de ratón (200-400ng), Ehr Ab (Etiqueta) (300-500ng), Ehr Ab (Etiqueta) (300-600ng).

Buffer: NaCl (2.3g/L), Na2HPO4 (7.5g/L), NaH2PO4 (8.6g/L).

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar tal como está empaquetado en el sobre sellado, ya sea a temperatura ambiente o refrigerado (2-30 ° C). La prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en el sobre sellado. El casete de prueba debe permanecer en el sobre sellado hasta su uso. NO CONGELAR. No lo use después de la fecha de vencimiento.

- PRECAUCIONES**
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
 - Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos.
 - Observe las precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos durante la prueba y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.
 - Use guantes desechables y protección para los ojos cuando se analicen las muestras.
 - La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente los resultados.
 - No saque el casete de prueba de su sobre hasta que antes de usar.
 - No reutilice el kit de prueba.
 - No mezcle componentes de diferentes lotes y diferentes productos.

- MATERIALES**
- Materiales proporcionados
- Casetes de prueba
 - Buffer

- Cuentagotas
 - Instructivo de uso
- Materiales necesarios pero no suministrados
- Temporizador
 - Centrífuga (para plasma)


- Contenedores de muestras

INSTRUCCIONES DE USO

Deje que el casete de prueba, la muestra, el buffer y / o los controles se equilibren a temperatura ambiente (15-30 ° C) antes de realizar la prueba.

1. Recolecte muestras de sangre completa, suero o plasma fresco del can y asegúrese de que las muestras no puedan estar turbias o precipitadas. Utilice únicamente muestras transparentes no hemolizadas. No deje las muestras a temperatura ambiente durante períodos prolongados. Las muestras de suero y plasma se pueden almacenar a 2-8 ° C hasta por 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras de suero y plasma deben mantenerse por debajo de -20 ° C.
2. Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada.
3. Sostenga el gotero verticalmente y transfiera **1 gota de muestra** (aproximadamente 10 µL) e inmediatamente agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80 µL) en el pocillo de la muestra (S), luego inicie el temporizador. Vea la ilustración de arriba.
4. Lea el resultado en 10 minutos. No interprete los resultados después de 15 minutos.

Nota: Si la línea de prueba es muy fuerte o incluso más oscura que la línea de control o la línea de control desaparece, puede ser una muestra positiva fuerte que no sea un resultado no válido. Se recomienda diluir la muestra de 3 a 5 veces con el tampón y volver a probar con una nueva prueba para confirmar el resultado.

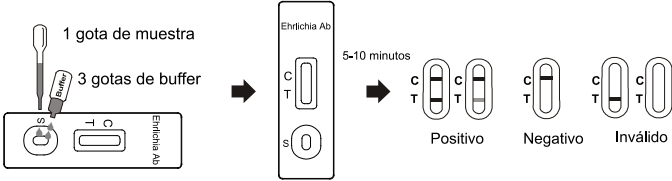

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Positivo: la presencia tanto de la línea C como de la línea T, sin importar que la línea T sea clara o vaga.

Negativo: solo aparece una línea C clara.

No válido: no aparece ninguna línea de color en la zona C, independientemente de si aparece la línea T. Si la línea T es muy fuerte pero no la línea C o la línea C débil, puede ser el resultado de una muestra positiva fuerte, se recomienda diluir la muestra y repetir la prueba con una nueva prueba para confirmar.

LIMITACIÓN

Prueba Ab de Ehrlichiosis canina es solo para uso de diagnóstico veterinario *in vitro*. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible del veterinario. Para un resultado preciso, se sugiere aplicar otro método como PCR o prueba de aislamiento de patógenos para la determinación final en la práctica.

ÍNDICE DE SÍMBOLOS					
	Atención, lea el instructivo de uso		Pruebas por kit		No reutilizar
	Solo para uso de diagnóstico <i>in vitro</i>		Utilizado por		# de catálogo
	Almacenar entre 2-30 °C		Número de lote		Consulte las instrucciones de uso
	No utilizar si el empaque está dañado		Fabricante		

Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.

#550,Yinhai Street

Hangzhou Economic & Technological Development Area

Hangzhou, 310018 P.R. China

Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn

Registro SENASA N°: B.006.014.I.00162

Importado y Distribuido por Mont Group SAC

USO VETERINARIO

Venta libre

Mantener fuera del alcance de los niños

Numero: 145857701

Fecha efectiva: 2020-04-20